

SİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ RADYOLOJİ TEMİZLİK DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON TALİMATI

1. AMAÇ

Merkez radyoloji temizliği ,dezenfeksiyon ve sterilizasyonu öncelikle merkez radyoloji personeli ve hastaları hastane enfeksiyonlarından korumak.

2. KAPSAM

Merkezdeki radyoloji ünitesini kapsar.

3. UYGULAMA

3.1. RADYOLOJİ TEMİZLİĞİ

1. Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bitiminde eller yıkanmalıdır.
2. Temizlik personeli, temizlik sırasında mutlaka eldiven giymelidir.
3. Eşya ve yüzey temizliği sırasında pembe renkli, lavabo temizliğinde kırmızı renkli temizlik eldiveni giyilmelidir
4. Temizlik daima temiz alandan kirli alana doğru yapılır. Kapı ve pencereler, gerekli görülen her durum, zamanda ve birime uygun sıklıkta sıcak su ve deterjanla silinmelidir.
5. Rutin temizlik dışında kan, idrar ve vücut salgıları yüzeye döküldüğünde, önce sıcak su ve deterjanla, sonra **%10'luk çamaşır suyu** ile dezenfekte edilmelidir.
6. Radyoloji ünitesi temizlik malzemesi kendine özel olmalıdır.Bu odada kullanılan temizleme suyu, kovası paspası ve temizleme bezleri başka bir odada kullanılmamalıdır.
7. Paspaslar ve kumaş malzeme temizlik bitiminde bol sıcak su ve deterjanla yıkanmalı, %2'lik çamaşır suyunda 20 dakika bekletilmeli, iyice sıkılmalı, kurutulmalı ve asla karanlık bir alanda saklanmamalıdır.
8. Kovalar ve leğenler temizlik bitiminde bol su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır.
9. Diş radyoloji ünitesi her hafta sonu rutin temizlenmelidir.
- 10.Diş radyoloji ünitesi sabah iş başlangıcından önce,öğle arası ,gün bitiminde ve ihtiyaç olduğu durumlarda temizlenmelidir.

3.2.Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde yapılan temizlik

- 1.Bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli,dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır.
- 2.Katı yüzeylerin üzerine damlayan,sıçrayan sıvıların kağıt havlu ile kaba kiri alınmalı 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenmeli.
- 3.Kullanılan tüm malzemeler kırmızı tıbbi atık torbasına konulmalıdır.
- 4.İşlemi yapan personel kendini korumak için gömlek ve eldiven giymeli.
- 5.İşlemden **sonra** mutlaka eller yıkanmalıdır.

3.3 Genel kurallar

- 1.Merkezin tüm bölümlerinde temiz ve kirli malzemeler ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir.
- 2.Temizlikte fırça kullanılmamalı,ıslak paspas kullanılmalıdır.
- 3.Temizlik her zaman temizden kirliye doğru yapılmalıdır.
- 4.Farklı alanlarda farklı temizlik bezi ve farklı paspaslar kullanılmalıdır.
- 5.Temizlik malzemeleri kova içerisinde bırakılmayacak.
- 6.Kullanılan solüsyon başka malzeme ile karıştırılmayacak.
- 7.Temizlik solüsyonları mümkünse her oda için ayrı olarak işlemden hemen önce hazırlanacak
8. Çamaşır suyu yüzey dezenfektanı olarak bir litre suya 10cc (%100), kan ve vücut sıvılarının temas ettiği yüzeylerde bir litre suya 100cc (%10) olarak hazırlanmalıdır.

3. 4.DİŐ RADYOLOJİ ÜNİTESİNDE DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON

3.4 RÖNTGEN CİHAZLARININ DEZENFEKSİYONU

1.DiŐ hekimliĐi radyolojisinde kullanılan periapikal ve panoramik röntgen cihazları,banyo tankları,banyo solüsyonları,otomatik röntgen banyo makineleri hijyenik kurallara uyulmazsa enfeksiyon riski taşırlar.Bu sebeple bu cihazların her kullanım sonrası temizlendikten sonra dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

2.Röntgen cihazının kullanımı sırasında eldiven takılmalıdır.Çıplak elle temas söz konusu ise temizlendikten sonra dezenfektan spreyle dezenfekte edilebilir.

3.Röntgen ünitesine gelen hastaların kan,tükrük v.b sıvıların sıçraması ihtimali varlığında eldiven,gözlük ,önlük ,maske gibi koruyucu ekipman giyilmelidir..

4.Ağızdan çıkan x-ray filmleri mutlaka tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.

ALET VE MALZEMELER	MERKEZİMİZDE YAPILAN DEZENFEKSİYON YÖNTEMİ	ALTERNATİF YÖNTEM
X ray filmleri	disposable	%0.1 lik sodyum hipoklorid(10 dk)
Ağız preseli	Otoklav steril ediliyor.	
Röntgen cihazları(panoramik,periapikal	Temizlik+ dezenfeksiyon	